



HUD- OCH SÅRSKYDD



SÅRSKYDDETS FORM MED EN PERFORERAD UTBUKTNING GER HUDEN UTRYMME ATT LÄKA OCH TILLFÖR SAMTIDIGT LUFTTILLFÖRSEL. SYRE ÄR EN VIKTIGT DEL I LÄKPROCESSEN.

Alltför ofta behöver vi antibiotika för att läka sår på djur. ALEXA sårskydd erbjuder en optimal läkmiljö och ökar chansen till naturlig läkning fri från infektion när stygn inte är ett alternativ.



SKYDDAR MOT INFEKTION

OMRÅDET DÄR SKYDDET SKA FÄSTA MÅSTE VARA RENT OCH TORRT

Päls har en naturlig fetthalt som gör det svårt att få tejp att fästa ordentligt. För att få bort fett kan du använda en desinfektionsservett eller liknande. Stryk flera gånger med servetten och torka sedan torrt med en ren trasa.

Om pälsglans har använts behöver du vara noga att få bort även den innan du fäster sårskyddet.

1. Gör noga rent området från smuts och fett med en desinfektionsservett.
2. Därefter torka ordentligt torrt med en ren trasa.
3. Försök att inte nudda klisterdelen när du tar bort skyddshöljet. När du fäst skyddet, håll kvar med fingrarna runtom. Klistret i tejen aktiveras vid värme och gör att skyddet fäster bättre på pälsen.



UTFORMAD FÖR ATT GE OPTIMALA LÄKFÖRHÅLLANDEN

STÄRK UPP MED EXTRA TEJP

Limmet är utvalt för att det ska fästa på päls men som vi alla vet är det knepigt att få något att sitta kvar på våra pälsklädda älsklingar. Allt från en rullning i boxen till det naturliga fettet i pälsen, som gör den blank och hal, ställer till problem för fäste.

För att vara säker på att skyddet håller sig på plats rekommenderar vi att du stärker upp med Kinesiologitejp, Tensoplast, Snögg eller liknande. Illustreras med rosa tejp runt sårskyddet på bilden ovan.