



SÅRSKYDD

TIPS INFÖR ANVÄNDNING AV ALEXA SÅRSKYDD

Området där skyddet ska fästa måste vara rent och torrt. För att få bort fett, smuts och medel som tex pälsglans kan du använda en desinfektionsservett.

1. Gör noga rent området från smuts och fett med en desinfektionsservett.
2. Därefter torka ordentligt torrt med en ren trasa.
3. Försök att inte nudda klisterdelen när du tar bort skyddshöljet. När du fäst skyddet, håll kvar med fingrarna runtom. Klisset i tejen aktiveras vid värme och gör att skyddet fäster bättre på pälsen.



STÄRK UPP MED EXTRA TEJP

Limmet är utvalt för att det ska fästa på päls men som vi alla vet är det knepigt att få något att sitta kvar på våra pälsklädda älsklingar. Allt från en rullning i boxen till det naturliga fettet i pälsen, som gör den blank och hal, ställer till problem för fäste.

För att vara säker på att skyddet håller sig på plats rekommenderar vi att du **stärker upp med Kinesiologitejp, Tensoplast, Snögg eller liknande.**

Illustreras med rosa tejp på bilden till höger.

